

Ortýza na koleno elektrická vyhříváná



Návod k použití

Zahřeje se během několika sekund, udržuje kolena v teple, lze použít i na lýtka, stehna.

Pohodlné používání

Postranní síťová kapsa pro uložení chladivých obkladů

Ovládání jedním tlačítkem - tři úrovně nastavení teploty:

Velmi snadná obsluha, teplotu a čas ohřevu můžete ovládat zcela sami.

Tlačítko napájení s LED indikátorem

červené - nejvyšší teplota / modré - střední / zelené - nejnižší nastavení teploty

Jedním krátkým stisknutím tlačítka můžete přejít na jiný stupeň ohřevu

Dva popruhy, zapínání na suchý zip.

Ortýza se může omotat a zafixovat v jakékoli poloze nohou nebo paží, kde potřebujete tepelný obklad. Už ji nemusíte držet v ruce.

Dodávána s napájecím kabelem USB. Lze ji zapojit do jakéhokoli napájecího zdroje s portem USB, jako je powerbanka, PC, notebook, stolní počítač a nabíječka do auta. Teplé koleno si můžete užít při mnoha příležitostech, ať už jdete, řídíte nebo pracujete v kanceláři.

Technické parametry:

Výstupní napětí USB: 5V/DC

První úroveň vyhřívání	(červené světlo)	teplota cca	44°C
Druhá úroveň vyhřívání	(modré světlo)	teplota cca	41°C
Třetí úroveň vyhřívání	(zelené světlo)	teplota cca	38°C

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

